

AnyHand®



Desinfektions- und Reinigungsanleitung



1 Einführung

Diese Desinfektionsanleitung bezieht sich auf die Anwendung der AnyHand® bei mehreren Patienten in Rehakliniken, Krankenhäusern, Therapiepraxen und anderen Gesundheitseinrichtungen sowie auf die Anwendung als Einzelbenutzer zu Hause.

In dieser Anleitung werden die von der LIME medical GmbH empfohlenen und validierten Verfahren zur Reinigung und Desinfektion erläutert.

- Die LIME medical GmbH gibt keinerlei Garantie, dass Abweichungen von den unten genannten Verfahren und die damit einhergehenden Auswirkungen auf die Produktleistung akzeptabel sein werden;
- Befolgen Sie bei der Verwendung der Reinigungs- und Desinfektionsverfahren stets die Anweisungen der LIME medical GmbH;
- **Stromschlaggefahr!** Tauchen Sie das Therapiegerät, das Netzteil und / oder das Netzkabel niemals in Wasser. Ziehen Sie vor der Reinigung oder Desinfektion immer zuerst den Netzstecker und vergewissern Sie sich, dass das Therapiegerät vollständig trocken ist, bevor Sie es an das Stromnetz anschließen

2 Zur Wischdesinfektion geeignete Teile

Grundsätzlich sind alle von außen erreichbaren Teile der AnyHand® für eine Wischdesinfektion geeignet. Bei den Patientenwechseln sollten Sie vor allem die Benutzeroberfläche, die Fingermechaniken, die Fingerhalterungen und die Silikonmatten wischdesinfizieren.

3 Vorbereitung der AnyHand® auf die Reinigung / Desinfektion

Gehen Sie wie folgt vor, um die AnyHand® korrekt auf die Reinigung und / oder Desinfektion vorzubereiten:

1. Stellen Sie sicher, dass sich keine Hand im Therapiegerät befindet.
2. Trennen Sie die AnyHand® von der Stromversorgung.
3. Trennen Sie die USB-Verbindung des Therapiegeräts zum Tablet / PC.
4. Entfernen Sie sämtliche Fingerhalterungen von den Fingermechaniken. Ziehen Sie diese dafür einfach in Richtung Fingerspitze bzw. zur Öffnung hin heraus.

4 Manuelle Reinigung

Vor der Desinfektion muss die gesamte AnyHand® von sichtbarem Schmutz gereinigt werden.

Verwenden Sie zur Reinigung ausschließlich ein leicht mit Wasser angefeuchtetes Tuch (Raumtemperatur, ca. 20 °C). Wischen Sie die AnyHand® mit dem angefeuchteten Tuch an den Stellen ab, die gereinigt werden sollen. Gehen Sie behutsam vor, damit die AnyHand® nicht beschädigt wird. Trocknen Sie die AnyHand® anschließend mit einem trockenen, saugfähigen Tuch ab.

Die Fingerhalterungen können unter fließendem warmen (ca. 45°C) Wasser abgespült werden.

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel. Wenden Sie außerdem unter keinen Umständen maschinelle Reinigungsverfahren (wie beispielsweise eine Spülmaschinenreinigung) an!

5 Manuelle Desinfektion

Nachdem Sie die AnyHand® von sichtbarem Schmutz gereinigt haben, ist die AnyHand® desinfektionsbereit.

Verwenden Sie zur Desinfektion ausschließlich aldehydefreie **Wischdesinfektionsmittel** auf Ethanolbasis (70- 94%).

Wischen Sie die AnyHand® mit dem Wischdesinfektionstuch gründlich ab. Gehen Sie behutsam vor, damit die AnyHand® nicht beschädigt wird. Lassen Sie das Wischdesinfektionsmittel entsprechend den Angaben auf dem Behälter des Mittels einwirken. Lassen Sie die AnyHand® anschließend für fünf Minuten an der Luft trocknen.

Verwenden Sie unter keinen Umständen andere Desinfektionsmittel oder Sprühdessinfektionsmittel jeglicher Art. Wenden Sie außerdem unter keinen Umständen maschinelle Desinfektionsverfahren (wie beispielsweise Thermodesinfektoren) an!

Die LIME medical GmbH empfiehlt die Verwendung von **mikrocid® alcohol free wipes** (Hersteller: **Schülke & Mayr UK Ltd**).

Die LIME medical GmbH übernimmt für Schäden, die durch die Verwendung von falschen Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln bzw. falschen Reinigungs- oder Desinfektionsverfahren entstanden sind, keinerlei Haftung!

Kontaktdaten:

Hersteller:



LIME medical GmbH

Hauptstraße 17 + 19
Alte Waggonfabrik (Gebäude 6306)
55120 Mainz
Germany

Tel: +49 6131/2501053
E-Mail: support@lime-medical.de
Web: www.lime-medical.de

Desinfektions- und Reinigungsanleitung:

Revision: 04
Sprache: Deutsch
Datum: 2021-01-06

